

EVOSS Üst Yapı Bileşenleri, İyileşme Başlıkları, Protetik Parçaları ve Aletleri Kullanım Kılavuzu

- **İyileşme** içine gömülmüş olan implantın, kemik iyileşmesinden sonraki aşamada diş etinin iyileşmesi için kullanılır
 - **Düz Üstyapı:** Düz abutment kullanılabilmesi için implantın açısız olarak hastaya yerleştirilmesi gerekmektedir.
 - **Standart Düz Üstyapı:** Konik üstyapı kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Bir vida yardımı ile implanta sabitlenir. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden dış yapıştırılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. İmplant iyileşmesinden sonra hekim tarafından protez yapımında kullanılmaktadır. Konik üst yapı diş etinde diş benzeri bir iyileşme sağlar. İmplant üzerine vida ile sıkılır ve üzerine siman ile dış protezi yapıştırılır. Konik abutment kullanılabilmesi için implantın açısız olarak hastaya yerleştirilmesi gerekmektedir.
 - **Altı Köşesiz Açılı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantı açılı yerleştirmesi durumunda, o açığı tolere etmek için kullanılır. Altı köşesiz olması indeklemeyi istediği gibi yapmayı sağlamak içindir.
 - **Açılı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantı açılı yerleştirmesi durumunda, o açığı tolere etmek için kullanılır. Bir vida yardımı ile implanta sabitlenir. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden dış yapıştırılır.
 - **Standart Açılı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantı açılı yerleştirmesi durumunda, o açığı tolere etmek için kullanılır. Bir vida yardımı ile implanta sabitlenir. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden dış yapıştırılır. Değişik çap, açısı ve diş eti boyları mevcuttur. Diş eti şekillenmesine yardımcı olmak amacı ile konik bir tasarıma sahiptir. İmplant ve analogla standart vida yardımıyla takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır
 - **Top Başlıklı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin hastaya hareketli protez uygulaması yapmak istediği durumlarda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. İmplant ve analogla takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
 - **Standart Top Başlıklı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantı düz veya açılı yerleştirmesi durumunda, o açığı tolere etmek için kullanılır. Bir vida yardımı ile implanta sabitlenir. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden dış yapıştırılır. Değişik çap, açısı ve diş eti boyları mevcuttur. Diş eti şekillenmesini kolaylaştırmak amacı ile konik bir tasarıma sahiptir. İmplant ve analogla standart vida yardımıyla takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
 - **Vidalı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantın üzerini oklüzlerden vidalı yapmak istemesi durumunda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. İmplant ve analogla takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
 - **Standart Vidalı Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin implantın üzerini oklüzlerden vidalı yapmak istemesi durumunda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. Konik yapıda olması diş eti iyileşmesi ve tutunumu arttırmaktadır.
- İmplant ve analogla takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.



- **Solid Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden diş yapıştırılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. İmplant ve analoğa takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
- **Standart Solid Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Üzerine porselen veya zirkon gibi malzemelerden diş yapıştırılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. Diş eti şekillenmesini kolaylaştırmak amacı ile konik bir tasarıma sahiptir. İmplant ve analoğa takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
- **Click Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin hastaya hareketli protez uygulaması yapmak istediği durumlarda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. İmplant ve analoğa takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.
- **Standart Click Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin hastaya hareketli protez uygulaması yapmak istediği durumlarda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur. Konik yapısı diş etiyle uyum sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.

İmplant ve analoğa takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.

- **Açılı Click Üstyapı:** Kemiğin içine gömülmüş olan implantın, dış bağlantısıdır. Hekimin hastaya hareketli protez uygulaması yapmak istediği durumlarda kullanılır. Değişik çap ve diş eti boyları mevcuttur.

İmplant ve analoğa takılabilir. Analogda laboratuvar provasını yapıp, dişi hazırladıktan sonra hastaya takılır.

- **CAD/ CAM (Tibase) Üstyapı :**CAD CAM cihazları için üretilmektedir. Laboratuvar bu üst yapıyı cihaza bağlayarak hastaya özel abutment üst yapı) yapar.
- **Interface Üstyapı.** Zirkon dişin alt yapısı olarak kullanılır.
- **Premil Üstyapı:** Kişiye özel üstyapı şeklindedir. Açısı, dişeti çıkış profili ve anatomik formu ile tamamen kişiye özel olarak hazırlanır. Çeşitli çapları bulunur.

Sterilizasyon ve Paketleme:

Başlıklar, üst yapı bileşenleri(bazı üst yapı bileşenleri iyileşme başlıklarıyla birlikte olmak üzere) protetik parçalar ve aletleri steril olmadan, yalıtımlı kapama blister içinde paketlenir. Hastalar üzerinde kullanılmadan önce bütün sistem parçalarının sterilizasyonu gereklidir. Bütün parçaları tavsiye edilen protokoller çerçevesinde otoklav ile sterilize edin. (Otoklav sterilizasyonun da (buhar) 121°C sıcaklıkta 15 Dakika parametrelerinde sterile edilir.

Üstyapı ve yardımcı bileşenlerin ambalajı sterilizasyona uyumlu değildir. Lütfen sterilizasyon için uygun otoklav poşedi kullanın.

Yerleştirme:



SC MEDİKAL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Pancar Mahallesi Göl sokak. No:52/A Torbalı- İZMİR

0(232)4222286

www.evoimplant.com

info@evoimplant.com

EVOSS® dayanakları ilgili implantlara prostetik vida ile 1.25 mm hex tornavida ile yerleştirilir. EVOSS® top başlı (ball) dayanaklar tek parça dayanak olup, implantlara yuvarlak kısmın üzerindeki hex yuvaya 1.25 mm hex tornavida kullanılarak sabitleştirilir. Top başlı dayanaklar için önerilen tork miktarı 25 Ncm'dir. Multi abutment uygulamasında siman kullanılmamalıdır. Çıkarılabilir proteze alışkın hastalara yönelik hareketli protez için Ball abutment ve Click abutmentler kullanılmalıdır. Açılı ball ve click abutment seçenekleri implantın duruşuna göre kullanılmalıdır. İmplantın uzun aksından 30° daha fazla olan aksiyel olmayan yüklemelerden kaçınılmalıdır.

Uyarılar:

Çeşitli üreticiler tarafından farklı tipte MRI cihazlarının üretildiğini ve her enstrümanın kullanıcı tarafından ayarlanabilen farklı parametreleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, implant üzerindeki net etkisi belirlenememektedir. Bu nedenle, SC Medikal kullanımdan implant uyumluluğunun sağlık uzmanlarına ve MRI üreticisine danışılmasını tavsiye etmektedir. Belirsizlik durumunda, spesifik birim ve önerilen parametrelerde mümkün bir pratik test yapılması düşünülebilir.

Yasal Sorumluluk Açıklaması:

Bu ürünün kullanımı sadece son kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürünün hatalı kullanılması, bu kullanım kılavuzuna uyulmaması durumunda meydana gelebilecek kayıp ve zarara ilişkin hiç bir yükümlülük üstlenilmemektedir. Bu sistem sadece orijinal EVOSS® parçaları ile kullanılabilir. Üçüncü parti parçalarının kullanılması EVOSS® tarafından sunulan garantiyi iptal eder ve ürünü etkisiz kılar.

Telif Hakkı ve Patent:

EVOSS® ait logolar korunmuş patentlerdir ve sadece SC Medikal Ürünler Ltd. Şirketinin sahipliğindedir. Bu işaretlerin herhangi bir şekilde kullanılması yasaklanmıştır ve kullanımı halinde Türkiye ve uluslararası hukuk dahilinde soruşturmaya tabidir.



SC MEDİKAL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Pancar Mahallesi Göl sokak. No:52/A Torbalı- İZMİR

0(232)422286

www.evoimplant.com

info@evoimplant.com

SEMBOLLERİN ANLAMI



: Kullanım kılavuzuna başvurunuz.



: Lot numarası



: Ürün kod numarası (Katalog numarası)



: Üretici adı ve adresi ve üretim tarihi



: Steril değildir



: Uyarı



: Üretim Tarihi



: Süresinde kullanın (Son kullanma tarihi)



: Tek kullanımlık, tekrar kullanmayın



: Tekrar steril etmeyin



: Ambalaj hasarlı ise kullanmayın



: Kuru yerde tutunuz.



SC MEDİKAL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Pancar Mahallesi Göl sokak. No:52/A Torbalı- İZMİR

0(232)4222286

www.evoimplant.com

info@evoimplant.com